

Anuform[®]



Manuale d'Istruzioni – IT



inner strength, outer confidence

Specifications

Materials:

Probe body: High Impact Polystyrene

Electrodes: Medical Grade Stainless Steel

Cables: PVC over copper tinsel conductors

Weight: 23.5g, Cable Length: 30cm

Connectors: 2 x 2mm diameter sockets

Electrode Surface Area: 3cm² per electrode

'In Use' product lifetime: 6 months



MED ITALIA SERVICE



info@meditaliaservice.com
meditaliaservicesrls@pec.it



www.meditaliaservice.com
shop.meditaliaservice.com



+39 3314605453
Via delle barozze 6 A
00040 - Rocca di Papa (Rm)

Partita iva: 16193371008
Numero REA: RM - 1640791
SDI: M5UXCR1



Istruzioni d'uso:

Da usare come sonda intra-ale per uomini e donne e come piccola sonda vaginale per le donne. Da usare unicamente con strumentazione per la stimolazione muscolare e strumentazione di biofeedback elettromiografico approvata conformemente alla EN60601-01 per la cura di incontinenza da "stress", da "urgenza" o "mista" e incontinenza fecale. Si raccomanda che questo dispositivo è consentito solo con le unità Neen Peritone o Neen Pericalm.

PER L'USO CON UN SOLO PAZIENTE – il dispositivo può essere riutilizzato dallo stesso paziente. PER L'USO CON UN SINGOLO ORIFIZIO – il dispositivo non deve essere impiegato sia ad uso vaginale che anale.

Utilizzare secondo le indicazioni fornite dal consulente medico.

Controindicazioni e Precauzioni:

NON USARE:

Con stimolazione elettrica se installato con un pacemaker cardiaco • In caso di gravidanza • Se il sigillo della confezione non è intatto • In presenza di infezioni, danni ai tessuti o recente ferita chirurgica • Vaginalmente durante le mestruazioni • Con stimolazione elettrica nei pazienti la cui anamnesi mostra carcinomi sul punto della stimolazione • Nel caso in cui si presenti un'irritazione o un disagio; rivolgersi al medico per ricevere assistenza.

SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE:

in fase di utilizzo della stimolazione elettrica in pazienti con sensibilità dei tessuti ridotta o alterata • Durante la stimolazione elettrica se l'anamnesi del paziente presenta casi di epilessia - rivolgersi al medico per richiedere consulenza • Quando si utilizza ANUFORM® con strumentazione che produce corrente superiore ai 2mA/cm². In caso di dubbi invitiamo a rivolgersi al produttore della strumentazione o al consulente medico.

Pulizia:

- Lavare ANUFORM® in acqua tiepida saponata.
- Risciacquare con acqua pulita e asciugare.
- Ripetere dopo ogni uso e asciugare completamente prima di riporre nel sacchetto in plastica.
- NON usare acqua bollente.
- Evitare l'immersione dei cavi in acqua per la pulizia
- Non sterilizzare in autoclave

Smaltimento:

Pulire completamente e smaltire il dispositivo conformemente alle normative locali. Ad uso vaginale Prese per il collegamento dei cavi della strumentazione.

Questo manuale è valido per l'unità Neen ANUFORM®. È pubblicato da Performance Health International Ltd. Performance Health International Ltd. non garantisce il suo contenuto e si riserva il diritto di migliorare e modificare in qualsiasi momento senza preavviso. Le modifiche saranno comunque pubblicati in una nuova edizione di questo manuale.

Ad uso anale Istruzioni d'uso:**IMPORTANTE:**

- Prima di iniziare a usare il dispositivo, lavarlo e asciugarlo secondo le indicazioni fornite.
- Applicare un leggero strato di gel KY o gel lubrificante simile alla punta e alle superfici metalliche della sonda per favorirne l'inserimento e garantire una buona conduttività degli elettrodi.
- Uso anale: Inserire nell'ano "spingendo", come in fase di evacuazione. L'estremità ad "anello" di ANUFORM® dovrebbe rimanere esterna all'ano in qualsiasi momento.
- Uso vaginale: Inserire nella vagina in posizione "da est a ovest", cioè con le superfici metalliche degli elettrodi rivolte verso le anche. Inserire fino a che il corpo di ANUFORM® non si trova completamente all'interno della cavità vaginale. L'estremità ad "anello" della sonda dovrebbe rimanere esterna, fra le labbra della vagina.
- Verificare che la strumentazione sia spenta prima di collegare i cavi della sonda.
- Utilizzare secondo le indicazioni fornite dal consulente medico. Dopo l'uso, spegnere il dispositivo e scollegare i cavi. Non tirare i cavi per scollegare la sonda.
- Lavare, asciugare e conservare secondo le istruzioni fornite nella pagina precedente.

