

























All'inizio della terapia riabilitativa sul pavimento pelvico furono sviluppate alcune sonde, fra le quali le più note e, forse, le prime ad uscire, la V2STW vaginale a due anelli e la A2STW, anale a 2 anelli entrambe della Beacmed. Con l'avanzare della tecnologia, sia le apparecchiature, sia le sonde, hanno avuto uno grande sviluppo e si sono molto evolute. Attualmente, anche in considerazione delle esigenze dei professionisti del settore sempre più preparati, esistono in commercio molte sonde, ognuna con caratteristiche dedicate alla terapia da eseguire, all'anatomia del paziente, al "comfort", alla patologia, ecc.

SONDE ANALI											
MODELLO	DESCRIZIONE	canali	n.	ELETTRODI Forma	Ø max	Mat e	Lun ghezza mm	Pe so gr	CARATTERISTICHE	USO	
	A2STW	standard	1	2	ad anello	15	oro	110	25	con manico per eventuale aggiustamento della posizione in corso di sessione Ogiva arrotondata per facilitare l'introduzione	anatomie normali
	ANALIS	standard	1	2	barretta	15	oro	140	13	Con manico che presenta 3 anelli per regolare e fermare la sonda dopo averla introdotta. Ogiva conica ancora più atraumatica	anatomie normali - sfinteri asimmetrici (dovuti ad interventi chirurgici o altro). Infatti gli elettrodi laterali permettono di poter adattare meglio la sonda ruotandola in modo da farla lavorare sul comparto che ha migliore muscolatura
	ARROW	forma conica e corta	1	2	barretta		metallo	45	23,5	Con anello terminale, di ridotte dimensioni, può essere usata anche come piccola vaginale	sfinteri corti dove non ci sia bisogno di regolare l'introduzione
	ANUS PROBE	con piastra terminale	1	2	anello	15	metallo	63	22	elettrodi sottili, ravvicinati tra loro ed arretrati, lasciano la parte introduttiva della sonda libera in modo che possa essere ben introdotta fino alla piastra terminale. La sonda è liscia e leggermente più larga in punta per ridurre il rischio di espulsione	anatomie normali
	RECTAL		1	2	anello	14	metallo	83	25	Forma a tubo con avvallamento centrale sui cui bordi ci sono gli elettrodi sottilissimi	sfinteri ipertonici e per dolore
	SPRING 201	con piastra regolabile	1	2	anello	19	metallo	da 65 a 105	25	piastra regolabile per migliore posizionamento e fermo. Forma a tubo con elettrodi ampi ed ogiva rastremata atraumatica.	anatomie normali
	PERI SPHERA-A	2 canali con posizione a tore	2	4	barretta	19	oro	60/120	24	barretta regolabile lunghezza inseribile 60 mm - totale 120 mm	sonda pensata per trattare il maschio in quanto l'ogiva tagliata si appoggia sull'area prostatica rendendola meno fastidiosa
	RECTALIS pressoria	pressoria a 2 palloncini per eseguire BFB manometrico. Questa sonda può essere utilizzata con dispositivi appositi per rilevare il BFB manometrico, oppure, da sola per mezzo del siringone in dotazione.									
	RECTOMAX pressoria	sonda pressoria a 2 palloncini per eseguire BFB manometrico. Questa sonda può essere utilizzata con dispositivi appositi per rilevare il BFB manometrico, oppure, da sola per mezzo del siringone in dotazione. Sonda prodotta con materiali di alta qualità che la rendono più duratura nel tempo.									

SONDE VAGINALI											
MODELLO	DESCRIZIONE	canali	n.	ELETTRODI Forma	Ø max	Mat e	Lun ghezza mm	Pe so gr	CARATTERISTICHE	USO	
	V2STW	standard	1	2	anello	25	oro	110	33	con manico per eventuale aggiustamento della posizione in corso di sessione	anatomie normali
	CLASSICA	standard diritta	1	2	U	25	oro	110	37	con manico per eventuale aggiustamento della posizione in corso di sessione la forma ad U serve a non stimolare l'uretra	anatomie normali pazienti con patologie o sensibilità uretrali
	MINIMA	A tampone	1	2	sfera	26	oro	65	16	priva di manico la forma a "tampone" aiuta a ridurre l'eventuale fastidiosità in quanto completamente inseribile	trattamento di dolore pelvico (vulvodinie ecc.) di lieve entità pazienti che, durante il BFB con tale sonda, capiscono meglio il lavoro attivo da eseguire in quanto non sentono un "corpo estraneo" che esce dalla vulva.
	PERISPHERA-O		1	2	sfera	26	oro	57/120	22	con manichetto e piastra regolabile per meglio posizionarla. Lunghezza inseribile 57mm - totale 120mm	
	PLUGGY	corta diritta e liscia	1	2	barretta	26	metallo	87	35	con piastra terminale	anatomie corte non troppo beanti perché potrebbe uscire durante il trattamento
	POLLY	corta, forma a pera	1	2	lateral	28	metallo	76	20	con piastra terminale	anatomie corte relativamente beanti, in quanto il diametro e la forma di questa sonda supportano abbastanza bene la tenuta in situ
	RING	corta, forma ovoidale, cava al centro	1	2	lateral	34	metallo	78	20	con piastra terminale	anatomie corte, vagine beanti, in quanto il diametro massiccio e la forma di questa sonda supportano bene la tenuta in situ
	JOYSTICK	standard, diritta e liscia	1	2	anello	25	metallo	130	80	con manico per meglio posizionare e mantenere in situ	vagine beanti con anatomia normale
	ATRESICA-S	corta, a tampone	1	2	anello	20	metallo	53	58	la forma a "tampone" aiuta a ridurre l'eventuale fastidiosità in quanto completamente inseribile	vagine atresiche
	ATRESICA-L	diritta e liscia	1	2	anello	20	metallo	100	72	con manico per meglio posizionare e mantenere in situ	vagine atresiche
	V2STFW	per SEF e BFB	1	2	anello	25	oro	110	35	dotata di palloncino in silicone medicale deve essere utilizzata con dispositivi appositi per rilevare il BFB manometrico	pazienti che riescono a capire meglio il lavoro da svolgere sentendo che contraggono qualcosa che risponde all'azione, quindi, l'esercizio risulta più realistico.
	VBTF	per BFB	1	--		35	--	110	35		
	PERISPHERA-H		2	4	sella	30	oro	60/120	13	con manico sottile per inserimento e mantenimento in situ che aiuta a dare maggior fisiologicità alla sonda e minore fastidio. Lunghezza inseribile 60 mm - totale 120 mm	pazienti con patologie o sensibilità uretrali La speciale forma degli elettrodi, posizionati uno sopra l'altro lateralmente ed orizzontalmente, permette di aderire meglio alle pareti e la loro disposizione evita di toccare e stimolare l'uretra.
	PERISIZE 4	A molletta	2	4	sferici		oro	110	20	l'introduzione si fa stringendo la sonda che, una volta rilasciata, aderirà perfettamente alle pareti	vagine beanti anche con lieve prolasso in quanto la forma assai appiattita, facilita il posizionamento
	PERISPHERA-U	Piatta	2	4	piatti	30	oro	60/120	23	Lunghezza inseribile 60 mm - totale 120 mm	La forma molto piatta la rende ideale per lavorare su pazienti con prolasso
	PERISPHERA-AT	diritta	2	4	barretta	11	oro	60/120	23	posizionatore regolabile sonda più sottile esistente Lunghezza inseribile 60 mm - totale 120 mm	vagine atresiche nel trattamento del dolore pelvico anche accentuato (vaginismi, vulvodinie ecc.) o per vergini

*Gli elettrodi coperti in oro rendono il prodotto anallergico, gli elettrodi in metallo contengono una piccola percentuale di Nickel.

ELETTROSTIMOLATORI E/O BIOFEEDBACK



MODELLO	n. canali	CORRENTI			BFB			Esame manom. Anorettale	Schermo	Wireless	Dock St.	Licenza attivazione software	PROGRAMMI					Accessori inclusi
		STIM	TENS	ETS	EMG	PRES	Giochi						Incontinenza	rehab	sport	liberi	n. sessioni	
ELETTROSTIMOLATORI DOMICILIARI																		
BIOLITO	2	C-M-B	H	--	--	--	--	--	b/n	--	--	--	5	--	--	1	1/5	Elettrodi n.4 40x40 n.4 40x80
CONTINENCE	2	C-LR	--	--	--	--	--	--	b/n	--	--	--	9	--	--	4	1	
PELVITONE	2	C-LR-M	--	--	--	--	--	--	b/n	--	--	--	11	--	--	3	1/5	
EVOSTIM-UG	2	C-LR	--	--	--	--	--	--	b/n	--	--	--	5	--	--	50	1/10	Sonda vaginale MINIMA
BIOFEEDBACK DOMICILIARI																		
SIMPLEX	1	--	--	--	si	--	--	--	b/n	--	--	si	--	--	--	--	--	-
EVOSTIM-P	2	C-LR	--	si	--	si	--	--	b/n	--	--	--	5	--	--	--	--	Sonda vag. pressoria V2STFW
EVOSTIM-E	2	C-LR	--	si	si	--	--	--	b/n	--	--	--	5	--	--	--	--	S.v PERISPHERA-O Elett n.4 40x40
PROFESSIONALI DI BASE																		
PRO	1	si	C-M	si	si	--	Si	--	Col. touch	si	--	si	22	25	--	12	5	
2	2	si	C-M	si	si	--	Su pc	--	b/n	si	--	si	19	9	21	11	5	
2 PRO	2	si	C-M	si	si	--	Si	--	Col. touch	si	--	si	19	9	21	32	5	
4	4	si	C-M	si	si	--	Su pc	--	b/n	si	--	si	19	9	21	11	5	
4 PRO	4	si	C-M	si	si	--	Si	--	Col. touch	si	--	si	19	9	21	32	5	
PROFESSIONALI																		
NANO URO	2	si	C-LR	si	si	opz.	--	--	Tablet 8" Colori	si	--	installato su tablet	A*	--	--	--	si	4 elettrodi 50x50
NANO FISIO	2	si	C-LR-M	si	si	opz.	--	--	Tablet 8" Colori	si	--	installato su tablet	--	B*	--	si	si	
NANO FISIO - URO	2	si	C-LR-M	si	si	opz.	--	--	Tablet 8" Colori	si	--	installato su tablet	A* + B*	--	--	si	si	
MICRO ARM	2	si	C-LR-M	si	si	opz.	--	Si	--	si	1	Manometria anorettale	--	--	--	si	si	
MICRO BASE	2	si	C-LR	si	si	opz.	Si	opz su ver. av.	--	si	1	Da installare sul proprio PC	A*	--	--	--	si	
NEO	2	si	C-LR-M	si	si	opz.	Si	opzionale	--	si	3	Da installare sul proprio PC	A* + B*	--	--	si	si	
LIBERTY	2	si	C-LR-M	si	si	opz.	Si	opzionale	Pc touch sc.	si	4	Inst. su PC touch	A* + B*	--	--	si	si	
TOTEM-UG	2+2	si	C-LR	-	si	si	--	--	--	si	--	Da inst. su PC	54	--	--	si	si	2 sonde vag. Combicom N.4 elettrodi

C=continua LR= lavoro-riposo M= modulata B= burst H= han

A* = 26 Perineo sfinterici anorettali – 40 Perineo sfinterici urinari genitali

B* = 7 Amiotrofici – 9 contratture muscolari – 2 dermatologici – 3 gravidanza – 6 neurologici – 4 osteoarticolari e tendinei - 24 posttraumatici - 2 respiratori – 24 reumatologici - 16 sportivi

Caratteristiche e specifiche tecniche possono variare



SPECIFICHE TECNICHE E GUIDA ALLA SCELTA

Sonde Vaginali - Sonde Anali

Apparecchi Domiciliari – Apparecchi Professionali di Base - Sistemi Professionali



info@meditaliaservice.com



www.meditaliaservice.com



+39 3314605453