

HEPY UREASE TEST

UREASI DRY TEST PER RILEVARE L'INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI



Hepy Urease Test è un dry test dell'ureasi, ultraveloce ed innovativo. Consente la diagnosi immediata dell'infezione da Helicobacter Pylori.

PRINCIPIO

Il test dell'ureasi ha lo scopo di rilevare il batterio Helicobacter Pylori nelle biopsie dello stomaco o del duodeno.

Il principio del test si basa sulla capacità fisiologica dell'Helicobacter Pylori di produrre grandi quantità di ureasi. Questo enzima decompone l'urea presente nel test, provocando il rilascio di ammoniaca che provoca un cambiamento di colore nel test dal giallo al rosa ed eventualmente anche al magenta ed al viola.

CARATTERISTICHE

- ✓ Dry test: Non è necessario utilizzare liquidi
- ✓ Risultati rapidi: Anche dopo 1 minuto
- ✓ Non è necessario riscaldare
- ✓ Conservazione a temperature tra 4°C e 42°C

RISULTATI

Il risultato è visibile immediatamente sul test.

È possibile valutare il grado di infezione da Helicobacter Pylori.

In caso di infezione grave il risultato può essere ottenuto anche dopo 1 solo minuto.

Non è possibile ottenere un effetto blushing ovvero non è possibile ottenere un risultato falso positivo con bile e sangue.

